



REHASENSE

Platform-gåbord

version: 1000GB

Bruksanvisning



CE

more than mobility

1. Allmänt

Bästa kund

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av det medicinska hjälpmedlet Platform-gåbord och instruerar i dess säkra användning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda hjälpmedlet. Det är särskilt viktigt att läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna. REHASENSE utvecklar sina produkter kontinuerligt och förbehåller sig rätten att ändra produkternas egenskaper och funktioner utan separat meddelande.

Skulle du ha frågor vänd dig i första hand till din återförsäljare. Du kan också kontakta REHANSE direkt. Kontaktuppgifterna hittar du på bruksanvisningens sista sida.

2. Avsedd användning, indikationer och kontraindikationer

Avsedd användning: Gåbordet har utvecklats som ett hjälpmedel för de som har svårt att stå eller gå på egen hand. Gåbordet gör det lättare att stå och gå självständigt. Dess huvudsakliga syfte är att ge balans och stabilitet, erbjuda en känsla av trygghet och avlasta kroppen genom att användaren stödjer sig mot bordet. Användaren kan stödja sig på de två höjbara underarmsstöden. Gåbordets konstruktion gör det extra lämpligt för personer som har svårt att greppa vanliga skjuthandtag. Därför erbjuder gåbordet mer balans och stabilitet än en vanlig rollator. Gåbordet är avsett att endast användas inomhus. All annan användning är förbjuden på grund av fallrisk.

Indikationer: Personer som (av olika hälsoskäl) behöver ett stabilt extrastöd för att kunna gå säkert. Personer som behöver tillfälligt stöd efter en operation eller vid rehabilitering av höft, knä, vrist eller fot.

Kontraindikationer: Gåbordet är inte lämpligt för personer som har allvarliga problem med kroppsbalansen eller som har för lite muskelstyrka för att kunna stå och gå även med extra stöd från ett gåbord. Patientens behov av ett gåbord som ett medicinskt hjälpmedel ska alltid bedömas av en läkare eller fysioterapeut.

3. Säkerhet

Se till att alla som använder gåbordet eller assisterar de som använder det läser igenom denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador på gåbordet och/eller personer som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts.



Användningsbegränsningar

- Största tillåtna belastning är 150 kg.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus på jämna underlag.
- Produkten får INTE användas som hjälpmedel för att resa sig upp.
- Gasfjädern är ENDAST avsedd som hjälp att höja armstöden.
- Gasfjädern får inte användas som extra hjälp för att resa sig upp.
- Produkten får ENDAST användas när armstöden har låsts i rätt läge med fingerskruvar.



Undvik olyckor

- Använd produkten endast i det avsedda syftet.
- Använd produkten endast när alla dess funktioner fungerar.
- Gör inga ändringar i produktens konstruktion, om du inte har fått ett skriftligt medgivande från tillverkaren i förväg.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan rörliga delar när du gör justeringar på produkten.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet HELA TIDEN. Det garanterar att användaren håller balansen och inte ramlar.
- När bordet används som ståstöd SKA parkeringsbromsarna vara låsta.
- Se till att bromsarna ALLTID är låsta när du börjar använda gåbordet eller lämnar det ifrån dig utan assistans
- .



Var försiktig så att du eller din assistent inte klämmer fingrar eller andra kroppsdelar mellan produktens delar vid montering, isärtagning eller justering. Var extra försiktig när du gör justeringar. Lägga märke till avståndet mellan produktens delar för att undvika att klämma fingrar eller andra kroppsdelar när du använder produkten.

4. Leverans, montering och produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Platform-gåbordet är utrustat med fyra hjul och en stabil ram av pulvermålat aluminium. Det har höga underarmsstöd med skjuthandtag och bromsar som ger extra säkerhet och komfort. Gåbordet är mycket lätt att manövrera, är stabilt och underarmsstöden kan ställas in i höjd- och sidled för att passa användaren. Gåbordet har två parkeringsbromspedaler och två riktningsslås med handtag.

Leverans

Gåbordet levereras färdigmonterat i kartong vilket möjliggör att det snabbt och enkelt kan tas i bruk.


Förpackningen innehåller:

- 2 färdigmonterade gåbord
- 2 bruksanvisningar

Inspektion

Kontrollera innehållet i förpackningen. Skulle någon del vara skadad - kontakta din återförsäljare omedelbart..

5. Gåbordets delar

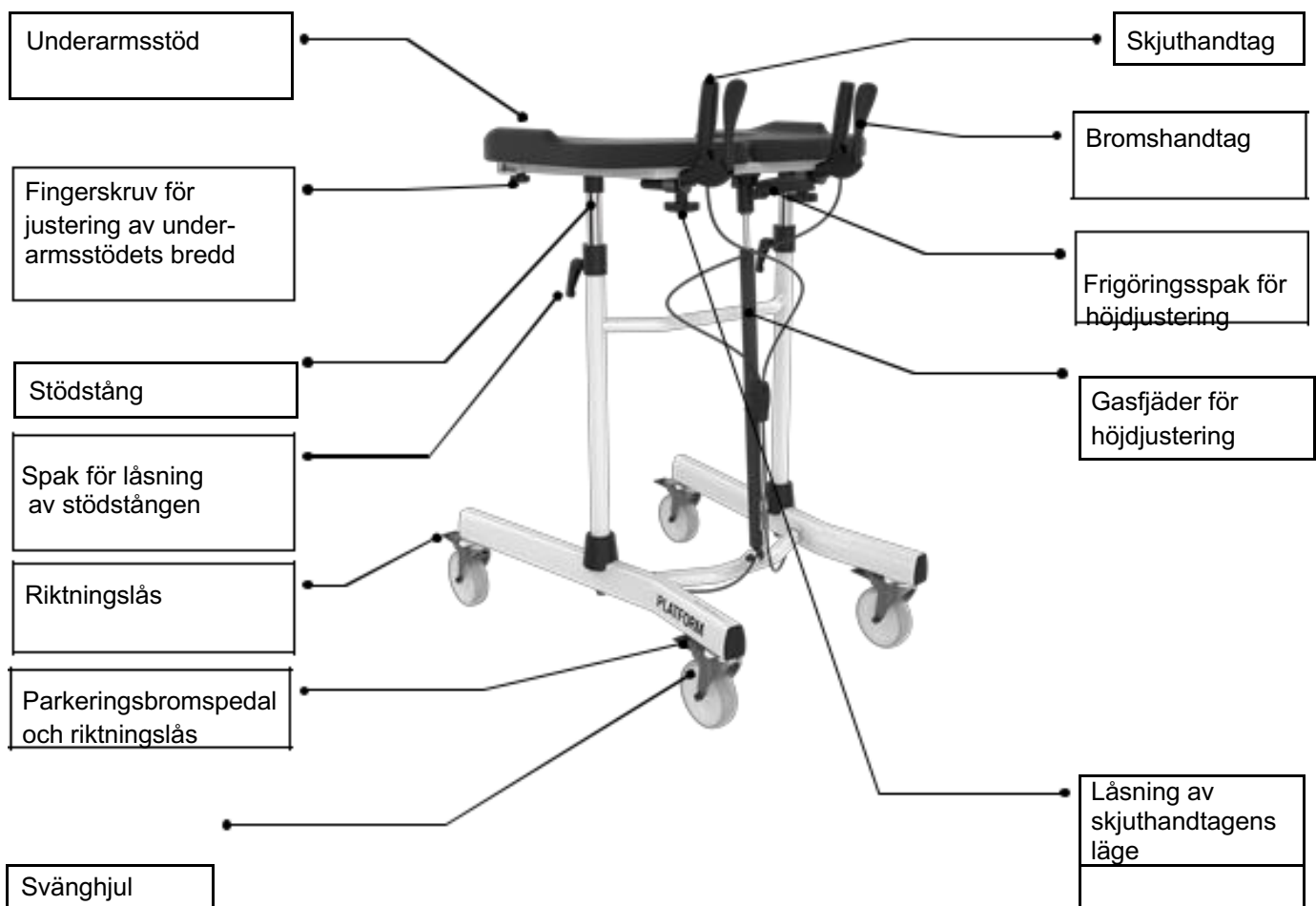

6. Användning



Se till att alla låsspakar och fingerskruvar är låsta och gåbordet är stabilt innan du börjar använda det. Kontrollera att ingenting sitter löst eller rör sig oavsiktligt. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskada.

Justering av underarmsstödet höjd

- Lossa de två låsspakarna på stödstången.
- Frigör gasfjädern genom att dra upp eller trycka ned frigöringsspaken för höjdställning.
- Ställ in underarmstödet på önskad höjd genom att trycka ner underarmstödet eller låta det höjas fritt med hjälp av gasfjädern.
- Släpp höjdställningsspaken.
- Dra åt låsspakarna.

Höjdställningsspaken fungerar i båda riktningarna, upp och ner.

Optimal höjd för underarmstöden är i samma nivå som användarens armbågar när han eller hon står med armarna rakt nedåt.



Gåbordet får endast användas när de två låsspakarna är åtdragna.

Justering av underarmstödens bredd

- Lossa de två fingerskruvarna under underarmstöden som låser underarmstödens bredd.
- Ställ in underarmstöden i önskad bredd genom att skjuta dem utåt eller inåt.
- Dra åt fingerskruvarna.

Justering av skjuthandtagens längd och vinkel

- Lossa låsspakarna under skjuthandtagen.
- Ställ in önskad längd och vinkel så att handtagen är lätta och bekväma att hålla i.
- Dra åt spakarna.

Låsning av bakhjul med handbromsar

- STOPPA GÅBORDET genom att trycka bromshandtagen mot skjuthandtagen.
- HÅLL GÅBORDET PÅ PLATS genom att hålla bromshandtagen nedtryckta.
- LÅS UPP GÅBORDET genom att släppa bromshandtagen. Då frigörs bromsen automatiskt.

Låsning och upplåsning av handbromsar

- Lås handbromsarna genom att trycka bromshandtagen framåt tills du hör ett klickljud.
- Lås upp bromsarna genom att dra bromshandtagen bakåt tills du känner att de släpper.

Låsning och upplåsning av framhjul

- Lås ett framhjul genom att trycka på hjulets bromspedal med foten tills bromsen låser sig.
- Lås upp bromsarna genom att lyfta upp bromspedalen med tåspetsen tills bromsen låser upp sig.

Riktningsslåsning av framhjul (förhindrar svängning)

- Om framhjulet är låst med fotpedalen kan det inte heller svängas.

Riktningsslåsning av bakhjul

- Lås bakhjulens bromsar genom att trycka på hjulets bromspedal med foten tills bromsen låser sig



Bakhjulens riktningsslåsning ska inte användas som parkeringsbroms. Parkeringsbromsarna ska låsas med handbromsar.

Syftet med riktningsslåsning är att skapa en stabilare rörelse i och med att bakhjulen fixeras och framhjulen svänger.



- När gåbordet används som ståstöd MÅSTE bromspedalerna vara låsta
- Ha alltid bromsarna ansatta när du inte använder gåbordet.
- Lämna aldrig gåbordet på ett lutande underlag.

7. Rengöring

Allmänt:


- Rengör gåbordet regelbundet och håll det rent.
- Lättare smuts och damm kan torkas av med en fuktig trasa.
- Ingrodd smuts kan tas bort med ett icke-frätande, mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
- Använd inte slipmedel eller rengöringsmedel med blekmedel då de kan orsaka skada och missfärgningar.
- Torka av med en torr trasa.

Hjul:

- Rengör hjulen med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa.
- På hjulnaven och i hjulgafflarna samlas ofta hår eller smuts som gör att hjulen rör sig trögare. Rengör hjulen noggrant emellanåt.

8. Produktetikett

Produktetiketten sitter på ett av ramens nedre rör:

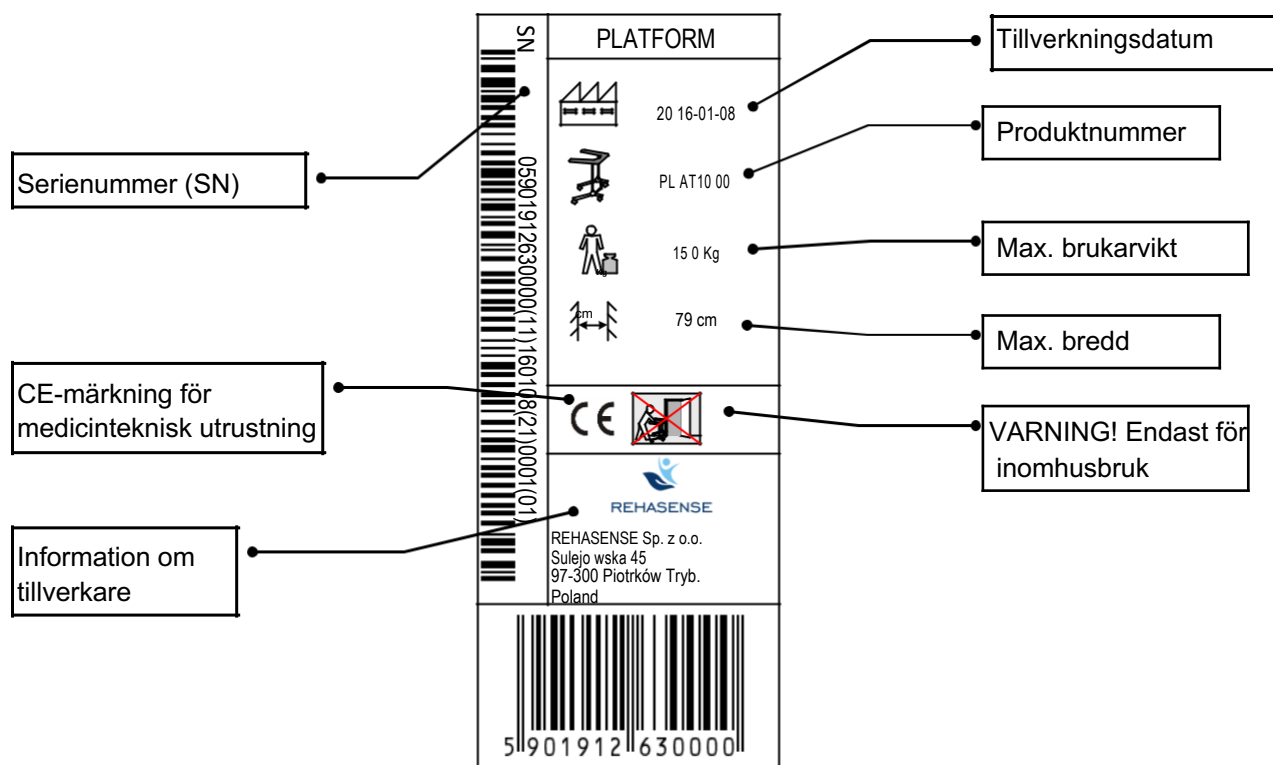

9. Tekniska data

Max. belastning	150 kg
Totalvikt	18 kg
Längd	80 cm
Bredd	69 - 80 cm

Underarmsstödens bredd	31 - 48 cm
Underarmsstödens höjd (justerbar)	90 - 130 cm
Totalhöjd (vid skjuthandtagen)	100 - 140 cm
Handbromsar	2 oberoende handbromsar med parkeringsbromsfunktion
Framhjul	4" svänghjul med parkeringsbromspedaler och riktningsbromsar
Bakhjul	4" svänghjul med parkeringsbromsar som manövreras med handbromsar och riktningslås

10. Transport

Gåbordet kan inte fällas ihop för transport. Om det behöver transporteras rekommenderar vi att man använder ett tillräckligt stort fordon för att gåbordet inte ska behövas tas isär. Se till att bordet späns fast i fordonet så att det är stabilt och inte rör sig under transporten.

11. Underhåll

- Se till att alla delar på produkten sitter fast HELA tiden.
- Kontrollera att skruvarna är åtdragna. Dra åt vid behov.
- Byt ut trasiga, skadade eller slitna delar omedelbart

12. Återanvändning

Gåbordet kan med fördel återanvändas av en annan ägare om den ursprungliga ägaren inte längre behöver den. Innan det överlämnas till en ny användare ska det ändå inspekteras av en auktoriserad tekniker.

Kontrollera följande:

- att konstruktionen är stabil och styv
- att bultar och muttrar är åtdragna
- skicket på mjuka delar
- skicket på hjul och kullager
- bromsarnas effektivitet och skick.

Om någon av ovanstående delar är sliten eller trasig ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar speciellt att man byter ut hjulen när produkten får ny ägare. Alla lösa bultar och muttrar ska dras åt. Gåbordet måste rengöras och desinficeras.

WARNING! Det är förbjudet att återanvända produkten om huvudramen är böjd eller trasig.

Denna bruksanvisning måste följa med när gåbordet överlämnas till den nya ägaren.

13. Kassering

När gåbordet kasseras får det inte slängas med vanliga hushållssopor. Alla material i gåbordet är återvinningsbara, och kasseringen ska ske i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

14. Garanti

Tillverkaren ger gåbordet två års garanti för tillverknings- och materialfel. Garantin gäller inte om produkten har använts i strid med instruktionerna i denna bruksanvisning.

För tekniska problem kontakta din återförsäljare. Du kan också vända dig direkt till Rehasense.

Återförsäljare i Finland:

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5

33900 Tammerfors

www.campmobility.fi

info@campmobility.fi

Valmistaja:

Rehasense® Sp.z o.o.

Sulejowska 45

97-300 Piotrków Trybunalski

Poland

www.rehasense.com

info@rehasense.com