



XXL-Rehab suihkutuolit  
XXL-suihkutuoli, pyörätön

FIN

MAX 325 KG



FIN

KÄYTTÖTARKOITUS:

- Bariatrisille käyttäjille.



## Käyttöohje XXL-suihkutuoli, pyörätön

### VAROITUS

- Tätä tuotetta ei saa käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen tekemää asianmukaista perehdytystä tuotteen käyttöön.
- Tuotteen käyttö maksimikuormitusta painavimmilla henkilöillä, voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen virheellisestä asennuksesta, kokoamisesta tai käytöstä aiheutuneista vaurioista tai vahingoista.
- Jos komponentit ovat vaurioituneet tai puuttuvat, ota välittömästi yhteyttä XXL-Rehabiin. ÄLÄ käytä korvaavia osia.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ilman XXL-Rehabin kirjallista lupaa suoritetuista korjaustoista.

⚠ Varmistaaksesi XXL-Rehab suihku- ja WC-tuolin asianmukaisen käytön, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityisesti huomioita varoitussymbolilla ⚠ merkittyihin kohtiin. Vahinkojen välttämiseksi, suihkutuolia saa käyttää vain koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitohenkilökunta sekä henkilöt, jotka ovat perehdytetty tuotteen asianmukaiseen käyttöön.

### KÄYTTÖTARKOITUS

XXL-Rehab pyörätön suihkutuoli on suunniteltu max. 325 kg painoisten henkilöiden käyttöön kylpyhuoneessa, suihkussa ja WC-tiloissa.

⚠ Käyttö yli 325 kg painoisilla henkilöillä voi johtaa suihkutuolin kallistumiseen, kaatumiseen tai vahingoittumiseen.

⚠ Suihkutuolia tulee käyttää vain tasaisilla, kovilla pinnoilla ja max. 3 astetta kaltevilla pinnoilla, koska tuoli saattaa muutoin kaatua.

### ENNEN KÄYTTÖÄ

Korkeudensäätöjalat ja selkäosa tulee asentaa ja säätää oikeaan korkeuteen ennen tuotteen käyttöä ja kiristää reikiin, jotka sijaitsevat suihkutuolin sivuilla.

⚠ Älä käytä suihkutuolia ennen kuin jalat ja selkäosan säätöpultit on asennettu oikein ja kiristetty, sillä muuten on olemassa vaara, että käyttäjä putoaa tuolista.

### KÄYTTÖ

⚠ Estääksesi suihkutuolin kippaamisen, käytä suihkutuolia vain tasaisilla kovilla pinnoilla sisätiloissa.

⚠ Jos käyttäjä tarvitsee apua suihkutuoliin siirtymisessä, avustajien on oltava erityisen tietoisia riskeistä, jotka liittyvät vaarallisiin nostoihin tai muihin vääränlaisiin nostoliikkeisiin painavan käyttäjän siirtämisessä. Sama koskee myös siirtoja nostimella, liukulaudalla tai muun tukilaitteen avulla.

### HUOLTO- JA PESUOHJEET

Valkoiset runko-osat, istuin ja käsitet voidaan puhdistaa vedellä ja yleisimmillä pintapuhdistusaineilla. Istuimen perusteellinen puhdistus: Irtota istuin, puhdista se ja paina sen takaisin paikalleen.

Mutterit ja pultit on tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa kiristettävä.

⚠ Pulttien ja mutterien tarkastuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkotilanteisiin ja tuolin ja käyttäjän vahingoittumiseen.

## TAKUU

XXL-Rehab myöntää suihkutuolien materiaaleille ja työlle yhden (1) vuoden takuun tuotteen laskutuspäivästä lukien.

Takuun piiriin ei kuulu, jos XXL-Rehabin määrittelyn mukaisesti, tuotetta on käytetty muuhun kuin sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen, jos tuotetta on laiminlyöty, väärinkäytetty, varastoitu tai käsitelty väärin, käytetty sopimattomasti, tehty luvattomia muutoksia tai siinä on vaurioita, jotka kuuluvat normaaliin kulumiseen.

Takuu ei päde, jos maksimipainokapasiteetti on ylitetty.

Tuotteen / osan luvattomat korjaukset ja mahdolliset komponenttien muutokset mitätöivät takuun.



XL-Rehab suihkutuolit on valmistettu ja turvallisuustestattu kansainvälisen DS/EN 12182:2000 standardin mukaisesti.

07/2014/JP

## VALMISTAJA

XXL-Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
Fax: +45 70 25 25 44  
www.xxl-rehab.com

Maksimipainokapasiteetti	325 kg
Kokonaispituus	80-101 cm
Kokonaisleveys käsitukien kohdalta	73 / 83 cm
Kokonaiskorkeus	79-94 cm
Istuinleveys	61 / 71 cm
Istuinsyvyys	40-52 cm
Istuinkorkeus	44-59 cm
Selkäosan korkeus	37 cm
Etäisyys lattiasta istuimen alle	33-48 cm
Käsitukien väli	67 / 77 cm
Korkeus istuin-käsituki	26 cm
Paino	15 / 16 kg
Runko	Pulverimaalattu kromimolybdeeniteräs
Istuimen ja selkätuen pehmusteen materiaali	Polyuretaani
ISO - luokitus	ISO 09 33 03





## KÄYTTÖOHJE

