

XXL-Rehab Kävelyteline King
XXL-Rehab Rollator King

FIN

MAX 325 KG



FIN

Käyttötarkoitus:

- Bariatriseen käyttöön



XXL-Rehab Rollator King kävelyteline

VAROITUS

- Tätä tuotetta ei saa käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen tekemää asianmukaista perehdytystä tuotteen käyttöön.
- Tuotteen käyttö maksimikuormitusta painavimmilla henkilöillä, voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen virheellisestä asennuksesta, kokoamisesta tai käytöstä aiheutuneista vaurioista tai vahingoista.
- Jos komponentit ovat vaurioituneet tai puuttuvat, ota välittömästi yhteyttä XXL-Rehabiin. ÄLÄ käytä korvaavia osia.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ilman XXL-Rehabin kirjallista lupaa suoritetuista korjaustoimista.

⚠ Varmistaaksesi XXL-Rehab Rollator King kävelytelineen asianmukaisen käytön, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityisesti huomioita kohtiin, jotka ovat merkitty ⚠ -varoitussymbolilla.

Vahinkojen välttämiseksi, rollaattoria saa käyttää vain koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitohenkilökunta sekä henkilöt, jotka ovat perehdytty tuotteen asianmukaiseen käyttöön.

KÄYTTÖTARKOITUS

1. Kävelytelinettä käytetään kävelyn avuksi ja tueksi.
2. Kävelytelinettä voidaan käyttää myös lepoistuimena, kun seisontajarrut ovat lukittuina.

⚠ Tuotteen käyttö yli 325 kg:n painoisilla henkilöillä saattaa aiheuttaa kävelytelineen kaatumisen tai vaurioitumisen.

KÄYTTÖÖNOTTO

Avaa laatikko ja tarkista, että mukana on seuraavat osat:

- Kävelyteline
 - 2 työntökahvaa, joista vain jarrukaapelit ovat liitettynä kävelytelineeseen
 - Kori
 - Selkätuki
1. Avaa kokoonaitettu kävelyteline.
 2. Löysää korkeudensäätöruuvit.
 3. Kiinnitä työntökahvojen putket kävelytelineeseen.
 4. Asenna selkätuki kävelytelineeseen vetämällä vasemmalla ja oikealla olevista nupeista. Vetämällä ja kääntämällä nuppia 90 astetta avaat nupin "auki" asentoon. Liu'uta putket sisään ja kiristä nupit kiinni.
- ⚠ **VAROITUS:** Varmista, että selkätuki ja nupit on kiristetty kunnolla!
5. Kiinnitä kori ulompaan vaakaputkeen (istuimen alapuolelle).
 6. Säädä lopuksi työntökahvojen korkeus.
 7. Varmista, että jarrut toimivat ja ovat oikein säädetyt.

SELKÄTUEN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN

Selkätuki asennetaan kävelytelineeseen varmistukseksi, ettei painopiste ole liian edessä, joka voi johtaa kävelytelineen kallistumiseen. Suosittelemme, että käytät kävelytelinettä aina selkätuki asennettuna.

1. Vedä rollaattorin vasemmalla ja oikealla olevista nupeista. Vetämällä ja kääntämällä nuppia 90 astetta avaat nupin "auki" asentoon.
 2. Liu'uta selkätuen putket sisään ja kiristä nupit kiinni.
 3. Varmista, että käännät nupit takaisin, siten, että ne lukitsevat selkätuen paikallaan.
- Toista vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä selkätuen irrottamiseksi.

TYÖNTÖKAHVOJEN KORKEUDENSÄÄTÖ

1. Irrota siipimutterit ja ruuvit.
2. Säädä haluttu korkeus ja laita ruuvit takaisin paikalleen.
3. Kiristä ruuvit siipiruuvista kääntämällä. Varmista, että ruuvit sopivat työntökahvan reikiin. Säädä kädensijoiden korkeus siten, että ne ovat lonkkanivelen korkeudella kanssa.

⚠ **VAROITUS:** Muista aina korkeutta säädettäessä kiristää siipimutterit tiukasti kiinni.

KOKOONTAITTAMINEN

1. Tartu istuimen etuosaan (sivu, joka on lähimpänä sinua kävellessä) yhdellä kädellä. Pidä toisella kädellä kiinni toisesta kädensijasta.
 2. Nosta istuinta.
 3. Kävelyteline taittuu nyt kokoon.
- Minimoidaksesi kokoonaitetun rollaattorin koon, irrota myös kori ja selkätuki.

JARRUTTAMINEN

Kävelytelineen jarruja voi käyttää kahdella tapaa:

1. Jos haluat hiljentää vauhtia tai pysähtyä hetkeksi: Purista kädensija ja jarrukahva yhteen, niin että jarrukahva liikkuu ylöspäin.
2. Jos haluat pysähtyä pitempään ja esim. istua lepoa varten: Työnnä molemmat jarrukahvat alas niin, että ne lukkiutuvat ala-asentoon. Kahvat pysyvät tässä asennossa, kunnes vapautat ne puristamalla kädensijasta ja jarrukahvasta yhteen.

JARRUJEN TARKASTAMINEN

Jälleenmyyjäsi varmistaa, että jarrut on asennettu oikein tuotetta toimitettaessa.

Jarrujen toiminta ja seisontajarrut tarkistetaan aina ennen käyttöä.

Ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjäsi jos seisontajarru ei lukkiudu tai jos jarrut eivät toimi kunnolla.

Jarrujen toiminta tulee tarkastaa 3 kk:n välein.

KÄVELYTELINEELLÄ KÄVELY

1. Aseta kädet työntökahvoille. Vapauta jarrut.
2. Astu sitten varovasti eteenpäin, yksi jalka kerrallaan.
3. Kävelyn helpottamiseksi, varmista, että kävelet tasaisella pinnalla. Huomioi maassa / lattiapinnassa olevat esteet, reiät ja kynnykset.
4. Vedä jarruista pysähtyäksesi.
 - ⚠ **VAROITUS:** Älä käytä kävelytelinettä yli +/- 3,5° kaltevilla pinnoilla.
 - ⚠ **VAROITUS:** Älä käytä kävelytelinettä pehmeillä ja epätasaisilla pinnoilla.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Runkokomponentit, kahvat, jarrut ja istuin voidaan puhdistaa vedellä ja pintapuhdistusaineella. Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia, jotka voivat esim. irrottaa kahvat (täpätti, asetoni, bensiini jne.).

⚠ **Tarkista ruuvit ja mutterit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.** Löystyneiden ruuvien kiristämättä jättäminen voi johtaa vahinkoihin.

Tuotteen maksimi käyttöikä on n. 8 vuotta.

TAKUU

XXL-Rehab myöntää Rollator Kingin materiaaleille ja työlle yhden (1) vuoden takuun tuotteen laskutuspäivästä lukien.

Takuun piiriin ei kuulu, jos XXL-Rehabin määrittelyn mukaisesti, tuotetta on käytetty muuhun kuin sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen, jos tuotetta on laiminlyöty, väärinkäytetty, varastoitu tai käsitelty väärin, käytetty sopimattomasti, tehty luvattomia muutoksia tai siinä on vaurioita, jotka kuuluvat normaaliin kulumiseen.

Takuu ei päde, jos maksimipainokapasiteetti on ylitetty.

Tuotteen / osan luvattomat korjaukset ja mahdollisten komponenttien väärentäminen mitätöivät takuun.

VAROITUKSET

- ⚠ Älä paina kokoajan jarruista kävellessäsi.
- ⚠ Älä koskaan istu kävelytelineellä ja potkuttele jalalla vauhtia eteen- tai taaksepäin, ei siirtyäksesi eikä "huvin vuoksi".
- ⚠ Muista aina lukita seisontajarrut ennen istuimelle istumista.
- ⚠ Älä käytä rollaattoria portaissa ja liukuportaissa.
- ⚠ Älä käytä rollaattoria pyörätuolina.
- ⚠ Älä käytä kävelytelinettä raiskaiden tavaroiden kuljettamiseen - kuljeta vain etukoriin sopivia tavaroita.
- ⚠ Älä käytä kävelytelinettä yli 3,5° kaltevilla pinnoilla.
- ⚠ Älä käytä kävelytelinettä pehmeillä ja epätasaisilla pinnoilla.
- ⚠ Muista aina kiristää korkeudensäädön siipiruuvit.

Maksimikuormitus	325 kg
Kokonaispituus	85 cm
Kokonaisleveys	71 cm
Leveys käsitukien välissä	61 cm
Korkeudensäätö	77.5-99 cm (2.5 cm välein)
Istuimen leveys	51 cm
Istuimen syvyys	35.5 cm
Istuinalueen leveys	58 cm
Istuinkorkeus	50 cm
Paino	15.7 kg
Korin maksimikuormitus	5 kg
Soveltuu istumiseen	Kyllä
Kokoontaitettava	Kyllä
Puhkeamattomat renkaat	Kyllä
Renkaat	8" umpikumi
Runkomateriaali	Pulverimaalattu alumiini
Istuin/selkäosan pehmuste materiaali	Polyuretaani
ISO -laatustandardiluokitus	ISO 12 06 06 - 11



XXL-Rehab Rollator King kävelyteline on valmistettu ja turvallisuustestattu DS/EN 12182:2000 standardin mukaisesti.

09/2017/JP

VALMISTAJA

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com



