



XXL- pyörätuoli Eclipse Tilt 270 kg – kallistettava tuoli suurenmoisille ihmisille

.....
XXLRehab **Eclipse Tilt**:n kallistusmekanismi mahdollistaa jopa 30 asteen kallistuksen enemmän tukea ja optimaalista mukavuutta tarvitseville. Kallistuksen nostovoima on säädettävissä, jolloin tuoli voidaan helposti kallistaa käyttäjän painosta riippumatta.

Teräsrunko antaa Eclipse Tilt -pyörätuolille suuremman lujuuden ja jäykkyyden, joten se tekee siitä myös pitkäikäisen. Runko on suunniteltu siten, että suurin osa käyttäjäpainosta on kelauspyörien päällä. Kelauspyörät on valmistettu erityisesti Eclipse-pyörätuolille; Ne ovat erityisen kovaa ja vankkaa tekoa, mikä tekee työntövoimasta ja ohjauksesta uskomattoman helppoa hyvin vähällä energialla.

6 eri istuinleveyttä 82 cm asti.
Saatavana 3 eri tyyppistä istuintyynyä.



Eclipse Tilt:n istuin on hyvin vankka- erilaiset lääketieteelliset tilanteet vaativat tukevan istuinosan (murtumat, hemiplegia, lateraaliset muutokset jne.), mutta myös muulloin, istuinosa tarjoaa XXL -käyttäjälle tukevan istuma-asennon ja helpottaa aktiivista liikkumista.

Eclipse pyörätuolissa on **säädettyvä istuinsyvyys, istuinkorkeus, jalkatukien kulma ja selkäosan kulma.**

Kaikki tämä helpottaa tuolin säätämistä jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Säätömahdollisuudet antavat käyttäjälle mahdollisuuden pysyä aktiivisena tuoliin siirryttäessä, tuolilla kelaessa ja ehkä jopa kävellä tuolia apuna käyttäen.

Selkäosa on rakennettu niin, että myös ne käyttäjät, joilla on ulkoneva takapuoli, saavat hyvän tuen lanneran-

galle - ongelma, johon harvoin kiinnitetään huomiota.

Etupyörät on sijoitettu istuimen eteen siten, että tuoli ei pääse kallistumaan eteenpäin - erittäin tärkeä ominaisuus, kun otetaan huomioon, että useimmilla bariatrisilla käyttäjillä on paljon painoa vatsapuolella.

Kaatumiseste edessä mahdollistaa käyttäjän siirtymisen pyörätuoliin ja siitä pois ilman kaatumisriskiä.



Kallistus 30°



Kaasujousi



Kaasujousien ansiosta kallistus on helppoa käyttäjän painosta riippumatta

Tekniset tiedot



Istuinleveydet	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Kokonaiskorkeus
50/55/61/66/72/82 cm	41-56 cm	41-51 cm	65-75 cm	106-126 cm
Kokonaisleveys	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max. käyttäjäpaino	Paino	
Ist.lev. + 25 cm	87 cm	270 kg	30 kg	

Valmistaja:
XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup,
Denmark
Phone: +45 7025 2522
Fax: +45 7025 2544
E-mail: info@xxl-rehab.com
www.xxl-rehab.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility
Finland 2017