



## Suksee™ -pyörätuolisukset

*Suksee™-pyörätuolisukset* ovat pyörätuolin renkaiden alle kiinnitettävät sukset. *Suksee™-pyörätuolisukset* helpottavat liikkumista loskaisilla tai lumisilla teillä, ulkoilureiteillä, jäällä jne. laajentaen näin pyörätuolin käyttäjän toimintaympäristöä huomattavasti myös talviaikaan. - Suksien kanssa voi mennä vaikka pilkille!

*Suksee™* sukset ovat universal-mallia, eli ne sopivat useimpiin pyörätuoleihin. Parhaiten sukset sopivat pyörätuoleihin, joissa tukipyörät ja kelauspyörät ovat samassa linjassa, mutta suksien toimintaa ei juurikaan haittaa, vaikka tukipyörät ovat hiukan kapeammassa linjassa, jolloin sukset hieman auraavat. Suksikourussa oleva pyöreäreunainen pohjaolake sallii myös tällaisen asennuksen.

Pyörätuolin renkaat asetetaan suksissa oleviin muovikouruihin ja kiinnitetään solki-kiristeisillä kiinnitysnauhoilla takaa kelauspyörien vanteen ympäri tai runkoputken ympäri mahdollisimman läheltä pyörän akselia ja edestä tukipyörien vanteen ympäri tai muusta sopivasta paikasta mahdollisimman alhaalta. Suksia käytetään aina avustajan kanssa avustajan työntämänä.

Valmistaja: **HVSuksee**

Laukkukuja 10, 90940 JÄÄLI

puh. 040-760 6637, [www.htsuksee.fi](http://www.htsuksee.fi), [myynti@htsuksee.fi](mailto:myynti@htsuksee.fi)